


FICHA TÉCNICA®

ASKINA® CALGITROL - MELHOR SOLUÇÃO PARA CONTROLE DE FERIDAS INFECTADAS

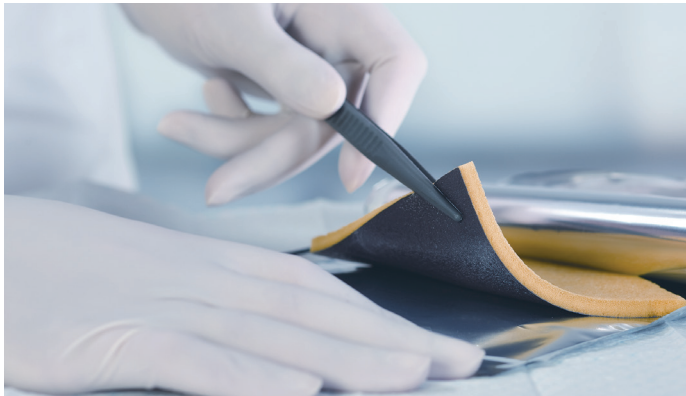

DESCRIÇÃO

Curativo estéril constituído por uma camada de espuma de poliuretano, que absorve o exsudato da ferida e uma matriz de alginato de cálcio e prata iônica que garante eficácia antimicrobiana por até 7 dias. Mantém o ambiente úmido ideal para cicatrização

INDICAÇÃO

Indicado para feridas infectadas, superficiais ou profundas.

CONTRA INDICAÇÃO

- Não utilizar em pessoas com hipersensibilidade aos alginatos ou a prata.
- Não deve ser utilizado em situações onde haja presença de metais.
- Não utilizar em queimaduras de 3º grau.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta.

COMPOSIÇÃO

Camada hidrofílica de espuma de poliuretano e uma camada de alginato de cálcio contendo 100% de prata em seu estado iônico. A espessura do curativo é de 5 mm.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Evitar a exposição à luz solar direta e armazenar à temperatura e umidade ambiente. Limpar a ferida com uma solução de limpeza adequada como a Solução de Prontosan® e compressas estéreis. Seque a pele ao redor da ferida.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Preparação

- a) Limpe a ferida com Prontosan® Solução ou água bidestilada.
- b) Seque cuidadosamente o tecido na periferia externa da ferida.

2. Aplicação

Selecionar o tamanho adequado do curativo que permita cobrir toda a ferida, assegurando de 2 a 3cm de margem circundante das bordas da ferida. Se necessário podem ser empregados vários curativos sobrepostos de forma a cobrirem integralmente feridas com uma grande área de extensão. O curativo deve ser colocado com a camada de matriz de prata em contato com a ferida e deve ser mantido no local de aplicação mediante auxílio de um curativo secundário, ou com um curativo simples, conforme seja apropriado.

3. Remoção

Remover o curativo secundário, se aplicável. Levantar cuidadosamente uma das extremidades do curativo em contato com a ferida. Se o curativo estiver na ferida ou no tecido neoformado, deve-se irrigá-lo com Prontosan® Solução ou água bidestilada de forma a permitir a remoção atraumática do curativo.

Apresentação / placas	Código	Quantidade
10 x 10 cm	6211010BR	Caixa com 10 unidades
10 x 10 cm	6211010	Caixa com 10 unidades
15 x 15 cm	6211510BR	Caixa com 10 unidades
15 x 15 cm	6211510	Caixa com 10 unidades
20 x 20 cm	6212010BR	Caixa com 10 unidades
20 x 20 cm	6212010	Caixa com 10 unidades