

# FICHA TÉCNICA - ASKINA® DERM

## DESCRIÇÃO

Curativo transparente estéril composto por uma película de poliuretano revestido de adesivo acrílico. Possui excelente capacidade de troca de vapor.

## INDICAÇÕES

Feridas na fase de epiteliação, como cobertura para feridas pós-operatórias, cobertura secundária, fixação de catéteres ou prevenção em área de atrito.

## CONTRAINDICAÇÕES

- Deve ser evitado em queimaduras de 3º grau e em feridas profundas.
- Em caso de infecção com sinais inflamatórios (calor, edema, rubor) deve ser contactado um médico ou um enfermeiro.

## BENEFÍCIOS

- Maleável, se adapta aos contornos corporais.
- Permite inspeção visual da ferida.
- Impermeável à água e bactérias.
- Alta taxa de transmissão de vapor úmido.
- Permite trocas indolores e atraumáticas.
- Fácil de retirar, sem agredir a pele.
- Sistema de aplicação inovador.

## COMPOSIÇÃO

Filme de poliuretano, revestido com adesivo acrílico.

## INSTRUÇÕES DE USO



1. Remova a película protetora impressa da face adesiva do curativo.



2. Posicione o curativo sobre a ferida com as abas de papel voltadas para a face da ferida e depois pressione cuidadosamente a fim de fixá-lo à ferida.



3. Segure as abas de papel com ambas as mãos e puxe-as lateralmente afim de fixar o curativo na região peri-lesional.



4. Uma vez que o curativo esteja fixado, remova as películas protetoras puxando as abas de remoção no sentido das setas impressas nas películas.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter à temperatura ambiente, de acordo com o prazo de validade.

| Apresentação / placas | Código   | Quantidade             |
|-----------------------|----------|------------------------|
| 6 x 7 cm              | F72033BR | Caixa com 100 unidades |
| 6 x 7 cm              | F72033   | Caixa com 100 unidades |
| 10 x 12 cm            | F72036BR | Caixa com 50 unidades  |
| 10 x 12 cm            | F72036   | Caixa com 50 unidades  |
| 10 x 20 cm            | F72037BR | Caixa com 10 unidades  |
| 10 x 20 cm            | F72037   | Caixa com 10 unidades  |
| 15 x 20 cm            | F72038BR | Caixa com 10 unidades  |
| 15 x 20 cm            | F72038   | Caixa com 10 unidades  |
| 30 x 20 cm            | F72039BR | Caixa com 10 unidades  |
| 30 x 20 cm            | F72039   | Caixa com 10 unidades  |

B. Braun Brasil | OPM

S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

Askina® Derm - Registro ANVISA nº 80136990429

