

FICHA TÉCNICA

ASKINA® SORB



DESCRIÇÃO

Curativo estéril composto de alginato de cálcio (85%) e carboximetilcelulose (15%), que ao reagirem com o exsudato, proporcionam a formação de um gel suave permitindo a manutenção dos níveis de umidade ideais para a cicatrização da ferida.

INDICAÇÃO

Feridas superficiais; profundas; túneis e fístulas; moderadas a altamente exsudativas; com ou sem infecção.

CONTRA INDICAÇÃO

- Não utilizar em próteses, órteses e queimaduras de terceiro grau.
- Não utilizar simultaneamente com agentes tópicos, tais como antissépticos e antibióticos.
- Poucos benefícios quando aplicado a feridas secas ou necrosadas.
- Não utilizar em contato com osso ou tendões.

BENEFÍCIOS

- Alta capacidade de absorção do exsudato (28,08 g/100cm²): desenvolve meio úmido ideal para a cicatrização da ferida e gera economia devido a redução do número de troca do curativo.
- Absorção Vertical: impede o extravasamento de exsudato, evitando a maceração das bordas da lesão.
- Não adere ao leito da ferida: troca sem dor ou traumatismo.
- Macio e flexível: adapta-se perfeitamente ao contorno da lesão.

- Remoção em peça única, tornando-o confortável e atraumático, ajudando a proteger o processo de cicatrização.

COMPOSIÇÃO

Evitar a exposição à luz solar direta e armazenar à temperatura e umidade ambiente. Limpar a ferida com Prontosan® Solução e compressas estéreis. Seque a pele ao redor da ferida.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Primeira aplicação do Askina® Sorb.



- a) Limpar a ferida com Prontosan® Solução
- b) Secar a pele ao redor da ferida.
- c) Selecionar previamente o tamanho apropriado de Askina® Sorb, o qual deverá cobrir na totalidade a superfície da ferida, assegurando-se de deixar uma margem de pelo menos 2mm.
- d) Aplicar o Askina® Sorb diretamente em contato com a superfície da ferida. Deixar uma margem de pelo menos 2mm ao redor da ferida.
- e) Cobrir com um curativo secundário e fixá-lo com adesivo cirúrgico ou similar.

f) Em caso de úlceras venosas de perna, terapia de compressão graduada pode ser usada em conjunto com Askina® Sorb, quando orientado de um enfermeiro.

2. Trocas subsequentes do curativo



- Remover o curativo secundário.
- Utilizar instrumentos esterilizados para retirar Askina Sorb que se encontra sob a forma de gel.
- Irrigar a ferida, lave e remova o gel com uma solução bidestilada e depois siga os procedimentos conforme as figuras.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar o produto ao abrigo da umidade e do calor excessivo. O armazenamento deve ser feito em local seco à temperatura ambiente.

Apresentação / Placas	Código	Quantidade
6 x 6 cm	2100SBR	Caixa com 15 unidades
6 x 6 cm	2100S	Caixa com 15 unidades
10 x 10 cm	2101SBR	Caixa com 15 unidades
10 x 10 cm	2101S	Caixa com 15 unidades
15 x 15 cm	2102SBR	Caixa com 10 unidades
15 x 15 cm	2102S	Caixa com 10 unidades

Apresentação / Fita	Código	Quantidade
2,7 x 34cm	2105SBR	Caixa com 10 unidades
2,7 x 34cm	2105S	Caixa com 10 unidades