

Perfusor Enteral ENFit

Perfusor Set ENFit

Produto de uso único – Proibido Re-processar. Destruir após o uso. Estéril – Atóxico – Apirrogênico Esterilizado por Óxido de Etileno.

Indicação:

Equipo extensor para administração de dietas enterais para uso em bomba de seringa Perfusora.

Instruções de Uso:

- Abrir a embalagem sob condições assépticas.
- Verificar se os conectores apresentam-se com os protetores de esterilização.
- Retirar o protetor do Conector ENFit.
- Adaptar o Conector ENFit na seringa ENFit ou equipo ENFit.
- Preencher o tubo com a fórmula de nutrição enteral ou água.
- Retirar o protetor do outro conector ENFit (Fêmea).
- Conectar o conector ENFit (Fê-

mea) do perfusor na Sonda Enteral.

- Proceder ao controle de infusão da fórmula de nutrição enteral.

Precauções e Advertências:

- Produto Isento de DEHP (DOP).
- Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.
- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo.
- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.
- Deve ser utilizado uma só vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou reesterilização.
- Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade.

Significado da Simbologia Utilizada:



Uso único



Isento de látex



Consultar as instruções para utilização

REF

Número de referência

LOT

Código do lote

STERILE/O

Esterilizado utilizando óxido de etileno



Data de fabricação/data de esterilização



Validade



Sem DEHP

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº.: 8013699059
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.053 Rev. A 02.24

B | BRAUN