

# Equipos Enteriais ENFit para Bombas de Infusão

## Infusomat Plus Set ENFit Infusomat Plus Set 2 vias ENFit

Produto de uso único – Proibido Re-processar. Destruir após o uso.  
Estéril – Atóxico – Apropriado  
Esterilizado por Óxido de Etileno.

### Indicação:

Equipos para administração de soluções enteriais, por meio de bomba de infusão B.Braun.

### Precauções e Advertências:


- Produto Isento de DEHP (DOP).
- Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.
- Não utilizar em bombas injetoras de contraste (altas pressões – maior que 2 bar)  
Descartar imediatamente após o uso.
- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação.
- Artigo de uso único, não sendo permitido o reaproveitamento ou re-esterilização.

- Siga as Instruções de Uso das Bombas de Infusão B.Braun e as diretrizes gerais para infusões paralelas.
- Para a primeira infusão, o volume de priming (preenchimento) deverá ser descontado do Volume Total a ser infundido.
- Ao utilizar a bomba Infusomat® Compact Plus é necessário estabelecer um volume inferior ou igual ao volume do frasco.
- Cuidados de armazenamento e transporte:
- Conservar em ambiente limpo e seco, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.
- Transportar com os cuidados necessários para manter a integridade do produto.

### Instruções para Uso:

1. Fechar a pinça rolete;
2. Conectar o equipo ao recipiente com a dieta enteral;
3. Preencher a câmara de gotejamento até a metade da porção inferior da câmara;
4. Abrir a entrada de ar da câmara de gotejamento.  
Abrir a pinça rolete e executar o preenchimento total da linha retirando todo o ar;
5. Instalar o equipo na Infusomat® Compact Plus;
6. Instalar o tubo na pinça de segurança da Infusomat® Compact Plus;
7. Fechar a porta da Infusomat® Compact Plus;

8. Conectar o Conector ENFit ou a ponta escalonada do equipo à sonda enteral do paciente;
9. Abrir a pinça rolete para liberar o fluxo corretamente. Configurar a bomba para a infusão desejada, conforme prescrição médica e manual do equipamento;
10. Após o término da infusão, fechar a pinça rolete;
11. Desconectar a extremidade da linha ao paciente;
12. Remover o equipo da Infusomat® Compact Plus.
13. Os equipos possuem uma segunda via para administração de líquidos (água e medicamentos) com conector ENFit para conexão em equipos enteriais e/ou perfusores e/ou seringas do modelo ENFit.

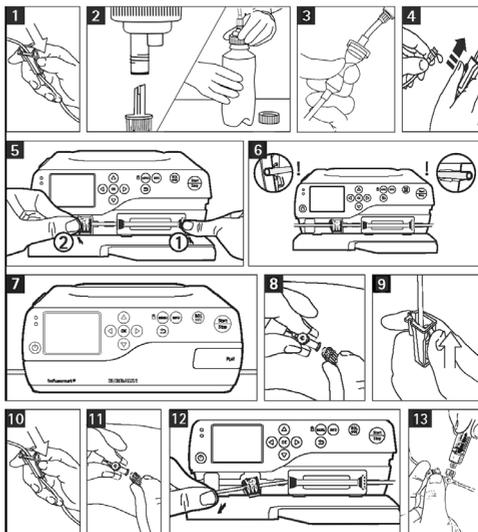

### Significado da Simbologia Utilizada:



Uso único



Isento de látex



Consultar as instruções para utilização



Número de referência



Código do lote



Esterilizado utilizando óxido de etileno



Data de fabricação/data de esterilização



Validade



Sem DEHP

Fabricado por:

**Laboratórios B. Braun S.A.**

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal  
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil  
Registro ANVISA nº.: 80136999058  
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira  
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.052 Rev. A 02.24

**B | BRAUN**