




Sugestões de Uso




1

Limpar o local de inserção de acordo com o protocolo da instituição. Inspeccionar o cateter antes de usar. Ajustar o ângulo de inserção de modo a facilitar uma punção com sucesso. Não é necessário girar o cateter.

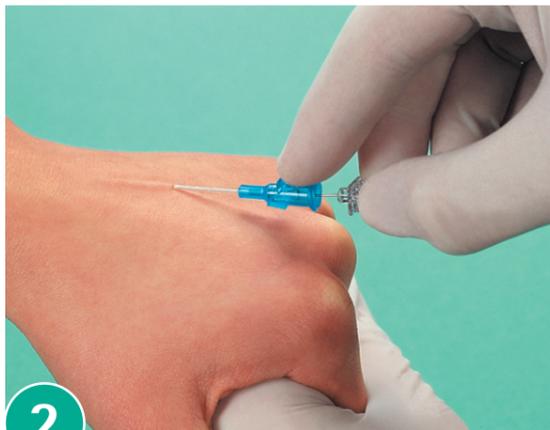

2

Inserir o cateter Introcán[®] Safety[™] na veia e observar o refluxo. Baixar o cateter até que fique paralelo à pele, avançar o conjunto 5 mm antes de progredi-lo na veia, enquanto retira suavemente a agulha.

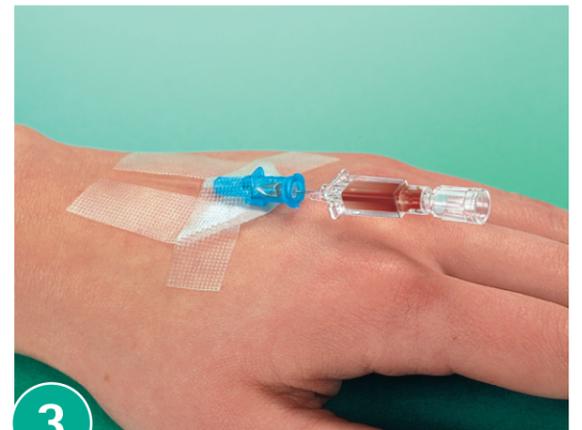


3

Fixar o cateter à pele. Com a agulha ainda introduzida minimizam-se os derrames de sangue.



4

Colocar o dedo médio sobre a veia distal à ponta do cateter, para interromper o fluxo sanguíneo. Ao mesmo tempo, estabilizar o canhão do cateter com o dedo indicador. Retirar a agulha através do cateter com um movimento contínuo e suave.

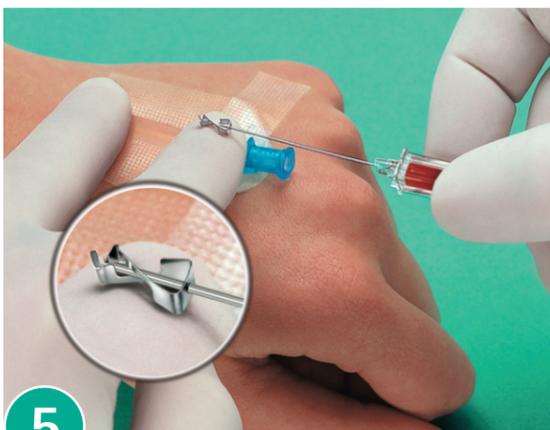

5

O design patenteado de segurança ativa-se automaticamente à medida que a mola de segurança se fixa ao bisel da agulha.



6

Conectar o sistema de infusão ao canhão do cateter e cobrir o local da punção com técnica estéril de acordo com o protocolo da instituição.

Características de Segurança

- Tecnologia de auto ativação da mola sem intervenção do profissional.
- Elimina o risco de ativação inadvertida.
- A mola de segurança cobre a ponta da agulha imediatamente após o uso.
- Não existe diferença na técnica de punção quando comparado com um cateter convencional.

Registro ANVISA nº 8.01369.90445