

FICHA TÉCNICA

ENTERALFIX MULTISPIKE S PARA BOMBA DE INFUSÃO

EQUIPOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM BOMBAS DE INFUSÃO B. BRAUN

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

Equipo para administração de dietas enterais em bombas de infusão B. Braun Infusomat Compact.

CONTRAINDICAÇÕES:

Os produtos não devem ser utilizados para administração ou mistura de soluções e medicamentos, que devem ser infundidos através de um acesso intravenoso.

PRECAUÇÕES ADVERTÊNCIAS:

- Antes de utilizar o produto, verificar o prazo de validade. Não utilizar se o prazo de validade estiver vencido;
- Os equipos são fornecidos estéreis e, portanto, se as embalagens estiverem danificadas, rasgadas ou perfuradas, devem ser considerados não estéreis e os produtos descartados;
- Não é permitida a reesterilização dos equipos sob nenhuma hipótese;
- Recomenda-se a troca dos equipos a cada 24 horas;
- Descartar imediatamente após o uso;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- PRODUTO ISENTO DE DEHP (DOP): Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Os Equipos são armazenados em sua embalagem original.
- Armazená-los a temperatura ambiente, em local fresco, limpo e seco, ao abrigo de luz solar direta, poeira e umidade, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.
- Transportar com os cuidados necessários para manter a integridade do produto.



- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer tipo de contaminação do produto.
- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer tipo de contaminação.

DIMENSÕES:

Comprimento total(*): aprox. 2,60

ESTERILIZAÇÃO:

Esterilizado por óxido de etileno


MATÉRIAS PRIMAS:

ABS, PE, EVA, EPE, PVC, PS, SB, SBS, PP, SI, PC

VALIDADE:

3 anos

(*) O comprimento total informado compreende da ponta perfurante até a conexão distal, incluindo todos os componentes. Pode-se esperar uma variação do comprimento total do produto devido a variações no processo produtivo. Tal variação não impacta na funcionalidade do produto.

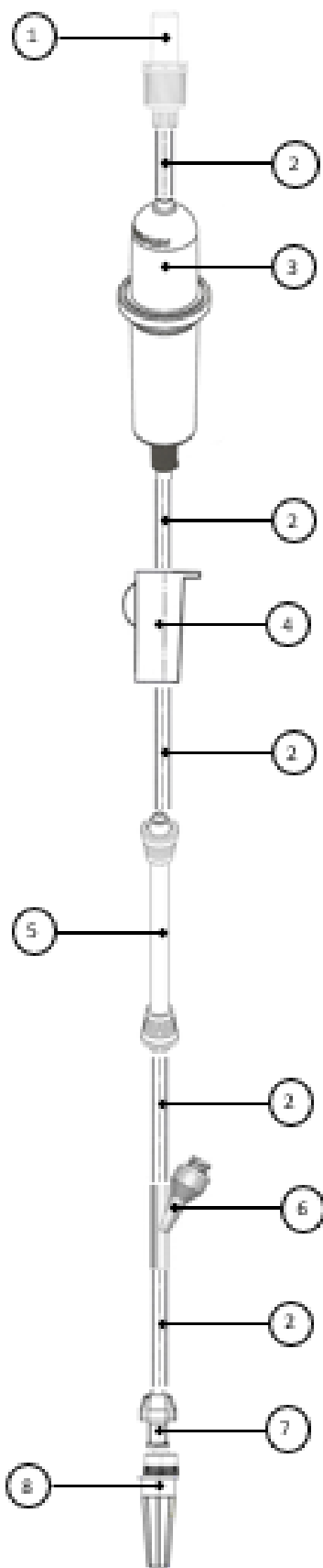

ITEM	DESCRIÇÃO
1	CONECTOR CROSS SPIKE COM PROTETOR
2	TUBO
3	CÂMARA GOTEJADORA
4	PINÇA ROLETE
5	SEGMENTO DE BOMBA
6	INJETOR NEEDLE FREE
7	LUER LOCK FÊMEA
8	CONECTOR ESCALONADO COM PROTETOR

CARACTERÍSTICAS

CÂMARA GOTEJADORA CONEXÃO COM DIETAS: CONEXÃO COM DIETAS:

- Conexão Cross Spike (ENPlus) na cor lilás;
- Incompatível com bolsas e frascos para administração de soluções intravenosas;
- Com protetor para proteção do usuário;
- Fácil conexão com frascos e bolsas de dietas.

CÂMARA GOTEJADORA:

- Transparente para fácil visualização da solução;
- Parte inferior flexível para facilitar o preenchimento.

PINÇA REGULADORA:

- Fácil manuseio, permite a regulagem e interrupção do fluxo.

TUBO:

- Flexível e na cor lilás para fácil identificação;
- Parcialmente transparente para permitir a visualização da solução.

SEGMENTO DE BOMBA:

- Permite a fácil conexão com a bomba de infusão Infusomat Compact.

INJETOR NEEDLE FREE

- Para conexão com seringas compatíveis.
- Permite a administração de água e medicamentos na forma líquida no trato gastrointestinal.
- Por dispensar a utilização de agulhas, minimiza a contaminação e o risco de acidentes.

CONEXÃO DISTAL:

- Conexão Luer Lock fêmea para fácil conexão com sondas existentes no mercado;
- Adaptador escalonado na cor lilás para fácil conexão com sondas existentes no mercado;
- Com protetor para proteção do usuário;

GENERALIDADES:

- Produto isento de DEHP;
- Não contém látex;
- Conexões e tubo na cor lilás para facilitar a diferenciação para demais produtos de outras aplicações (como exemplo: Administração intravenosa);
- SKU B. Braun: 402113
- 60 unidades por caixa;
- Registro ANVISA no. 80136990733

Responsável Técnica: Sonia M Q Azevedo - CRF- RJ 4260

B. Braun Brasil | Hospital Care | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Registro ANVISA n.º. 1.00085.30046

