

# B. Braun Peridural Simples

Produto de uso único – Destruir após o uso – Proibido Reprocessar. Estéril – Atóxico – Apirogênico. Esterilizado por Óxido de Etileno.

## Indicação:

Produto indicado para procedimento de anestesia regional. Possui todos os materiais necessários para a realização desta técnica.

## Instruções de uso:

1. Abra e remova a embalagem;
2. Prepare o produto para o procedimento;
3. Prepare o local de punção com o anti-septico desejado;
4. Aspire os anestésicos conforme o desejado;
5. Efetue o procedimento de anestesia regional seguindo as melhores práticas recomendadas;
6. Descarte todo o material em coletor de resíduos de saúde apropriado.

## Precauções e Advertências:

- Produto estéril e apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno;
- Use técnica asséptica;
- Usar somente se a embalagem unitária estiver íntegra;
- Inspecione previamente cada componente antes do uso. Se danificados não utilize;
- Observe as precauções universais de segurança. Siga as precauções universais ou protocolo da Instituição de Saúde sobre o uso e descarte de materiais médico-hospitalares;
- Procure atenção médica caso ocorra acidente;
- Comunique acidentes com agulha imediatamente;
- Trate a área conforme o protocolo da Instituição de Serviço de Saúde.
- Acidentes com agulhas contaminadas podem causar doenças graves tais como hepatite, HIV (SIDA) entre outras doenças infecciosas;

- Não reencape agulhas. Tentar reencape as agulhas é perigoso;
- Descarte os componentes do produto em coletor de resíduos de saúde apropriados;
- Se houver resistência excessiva, não force a agulha, pois poderá danificar a mesma;
- Não tente consertar uma agulha danificada. Descarte-a e utilize uma nova;
- Deve ser utilizado por profissionais de saúde qualificados e devidamente treinados;
- Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.
- Mantenha estocado e transporte em condições adequadas.

## Armazenamento:

Conservar em local seco e limpo.

## Quant. Componentes

01	Campo cirúrgico fenestrado circular
04	Compressas de gaze
03	Espônjas para anti-sepsia
01	Papel toalha
01	Cuba
01	Seringa 5 ml
01	Seringa 20 ml
01	Seringa de perda de resistência
01	Agulha peridural G17 x 3 1/4" (1,5 x 80)
01	Agulha 22 G1 1/4" (0,70 x 30)
01	Agulha 18G 1 1/2" (1,20 x 40)
01	Agulha 26G 1/2" (0,45 x 13)

Fabricado por:

## Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal  
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil  
Registro ANVISA nº.: 8.01369.90585  
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira  
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.006 Rev. B 02.24

**B | BRAUN**