

# B. Braun Raqui com Agulha

## Modelos comerciais / Los modelos comerciales:

B. Braun Whitacre G27 x 3 1/2", B. Braun Whitacre G27 x 4", B. Braun Whitacre G27 x 4 3/4", B. Braun Whitacre G25 x 3 1/2", B. Braun Whitacre G25 x 4", B. Braun Whitacre G22 x 3 1/2", B. Braun Quincke G29 x 4 3/4", B. Braun Quincke G29 x 3 1/2", B. Braun Quincke G27 x 4 3/4", B. Braun Quincke G27 x 3 1/2", B. Braun Quincke G26 x 4 3/4", B. Braun Quincke G26 x 3 1/2", B. Braun Quincke G25 x 3 1/2", B. Braun Quincke G25 x 3", B. Braun Quincke G22 x 4 3/4", B. Braun Quincke G22 x 3 1/2", B. Braun Quincke G22 x 3", B. Braun Quincke G22 x 1 1/2", B. Braun Quincke G20 x 3 1/2", B. Braun Quincke G20 x 3", B. Braun Quincke G19 x 3 1/2", B. Braun Quincke G19 x 1 1/2", B. Braun Quincke G18 x 3 1/2", B. Braun Quincke G18 x 3".

Produto de uso único - Destruir após o uso - Proibido Reprocessar. Estéril - Atóxico - Apirogênico. Esterilizado por Óxido de Etileno.

## Indicação:

Produto indicado para procedimento em anestesia raquidiana. Possui todos os materiais necessários para a realização desta técnica.

## Instruções de uso:

1. Abra e remova a embalagem;
2. Prepare o produto para o procedimento;
3. Prepare o local de punção com o anti-séptico desejado;
4. Aspire os anestésicos conforme o desejado;
5. Efetue o procedimento de anestesia raquidiana seguindo as melhores práticas recomendadas;
6. Descarte todo o material em coletor de resíduos de saúde apropriado.

## Precauções e Advertências:

- Produto estéril e apirrogênico. Esterilizado por óxido de etileno;
- Use técnica asséptica;
- Usar somente se a embalagem unitária estiver íntegra;
- Inspeção previamente cada componente antes do uso. Se danificados não utilize;

- Observe as precauções universais de segurança. Siga as precauções universais ou protocolo da Instituição de Saúde sobre o uso e descarte de materiais médico-hospitalares;
- Procure atenção médica caso ocorra acidente;
- Comunique acidentes com agulha imediatamente;
- Trate a área conforme o protocolo da Instituição de Serviço de Saúde;
- Acidentes com agulhas contaminadas podem causar doenças graves tais como hepatite, HIV (SIDA) entre outras doenças infecciosas;
- Não reencape agulhas. Tentar reencapar as agulhas é perigoso;
- Descarte os componentes do produto em coletor de resíduos de saúde apropriados;
- Se houver resistência excessiva, não force a agulha, pois poderá danificar a mesma;
- Não tente descartar uma agulha danificada. Descarte-a e utilize uma nova;
- Deve ser utilizado por profissionais de saúde qualificados e devidamente treinados;
- Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar;
- Mantenha estocado e transporte em condições adequadas.

## Armazenamento:

Conservar em local seco e limpo.

## Quant. Componentes

01	Campo cirúrgico fenestrado* circular (75 x 60 cm)
04	Compressas de gaze (15 x 30 cm)
03	Espônjas para anti-sépsia
01	Papel toalha
01	Cuba
01	Seringa 5 ml
01	Seringa 3 ml
01	Agulha 18G 1 1/2" (1,20 x 40)
01	Agulha 26G 1/2" (0,45 x 13)
01	Agulha 22G 1 1/4" (0,70 x 30)
01	Introdutor G20 x 1 3/8" - Comp. 35 mm (Para agulha de raqui-anestesia)
01	Agulha de raqui-anestesia

## Intención de uso:

Producto indicado para el procedimiento de la anestesia espinal. Cuenta con todos los materiales necesarios para llevar a cabo esta técnica.

## Intención de uso:

Producto indicado para el procedimiento de la anestesia espinal. Cuenta con todos los materiales necesarios para llevar a cabo esta técnica.

## Instrucciones de uso:

1. Abra y retire el embalaje;
2. Preparar el producto para el procedimiento;
3. Preparar el lugar de punción para el antiséptico deseado;
4. Aspire anestésicos como se debe;
5. Hacer que el procedimiento de anestesia espinal siguiendo las mejores prácticas;
6. Deseche todo el material en un recipiente para residuos médicos apropiados.

## Precauciones:

- Producto estéril, apirógneo. Esterilizada por EO;
- Utilice una técnica aséptica;
- Use sólo si el paquete de la unidad está intacta;
- Inspeccionar previamente cada componente antes de su uso. Si está dañado, no use;
- Tenga en cuenta las precauciones de seguridad universales. Sigala precauciones universales o protocolo de establecimiento médico sobre el uso y eliminación de los materiales de uso médico;
- Busque atención médica en caso de accidente;
- Comunicar las lesiones por pinchazo de inmediato;
- Trate el área como la institución del protocolo de Servicio de Salud;
- Los accidentes con agujas contaminadas pueden causar enfermedades graves como la hepatitis, el VIH (SIDA) y otras enfermedades infecciosas;

- No volver a tapar las agujas. Trate de volver a tapar las agujas es peligroso;
- Deseche los componentes del producto en colector de residuos médicos adecuado;
- Si hay demasiada resistencia, no fuerce la aguja, ya que puede dañarlo;
- No intente reparar una aguja dañada. Desechélo y use uno nuevo;
- Para ser utilizado por los profesionales de la salud calificados y capacitados;
- Producto de un solo uso. Desechar después de su uso. Prohibido reprocessar;
- Mantener almacenado y transportar en condiciones apropiadas.

## Almacenamiento:

Almacenar en un lugar seco y limpio.

Producto de un solo uso - Desechar después de su uso - Prohibido reprocessar.

Estéril - No tóxico - Apirógneo. Esterilizado por Óxido de Etileno.

## Cantid. Componentes

01	campo quirúrgico circular fenestrado (75 x 60 cm)
04	Compressas de gaze (15 x 30 cm)
03	Espônjas para la antisepsia
01	Toalla de papel
01	Cuba
01	Jeringa de 5 ml
01	Jeringa de 3 ml
01	Agulha 18G 1 1/2" (1,20 x 40)
01	Agulha 26G 1/2" (0,45 x 13)
01	Agulha 22G 1 1/4" (0,70 x 30)
01	Introdutor G20 x 1 3/8" - Comp. 35 mm (Por anestesia espinal aguja)
01	Anestesia espinal aguja

Fabricado por:

## Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal  
 CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil  
 Registro ANVISA nº: 8.01369.90594  
 CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira  
 S.A.C.: 0800-0227286

3.107.004 Rev. B 02.24

**B | BRAUN**