






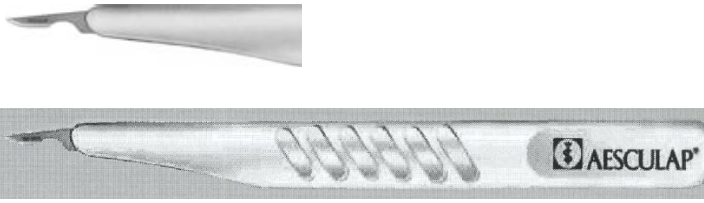

Instruções de Uso

BISTURI DESCARTAVEL AESCULAP

O modelo de Instruções de Uso abaixo se aplica aos seguintes produtos:

| Código | Descrição | Modelo |
|---------|---|--|
| BA364 | ESCALP.DESCART.ESTERILIZ.#364 CINZ. |  |
| BA365 | ESCALP.DESCART.ESTERILIZ.#365 AZUL |  |
| BA367 | ESCALP.DESCART.ESTERILIZ.#367 AMAR. |  |
| BA311SU | BISTURI COMPRIDO DESCARTÁVEL ESTER.#11 |  |
| BA323SU | BISTURI COMPRIDO DESCARTÁVEL ESTER.#23 |  |
| 5518016 | ESCALPELO ESTERILIZ. CUTFIX #23 |  |
| BA218 | ESCALPELO AÇO CARBONO #18 | |
| BA223 | ESCALPELO AÇO CARBONO #23 | |
| 5518032 | ESCALPELO ESTERILIZ. CUTFIX #15 |  |
| BA215 | ESCALPELO AÇO CARBONO #15 | |
| 5518040 | ESCALPELO ESTERILIZ. CUTFIX #11 |  |
| BA211 | ESCALPELO AÇO CARBONO #11 | |
| 5518059 | ESCALPELO ESTERILIZ. CUTFIX #10 |  |
| BA210 | ESCALPELO AÇO CARBONO #10 | |
| BA219 | ESCALPELO AÇO CARBONO #19 | |

Instruções de Uso
BISTURI DESCARTAVEL AESCULAP

| | | |
|---------|--|--|
| 5518067 | ESCALPELO ESTERILIZ. CUTFIX #20 |  |
| BA220 | ESCALPELO AÇO CARBONO #20 | |
| 5518075 | ESCALPELO ESTERILIZ. CUTFIX #21 |  |
| BA221 | ESCALPELO AÇO CARBONO #21 | |
| 5518083 | ESCALPELO ESTERILIZ. CUTFIX #22 |  |
| BA222 | ESCALPELO AÇO CARBONO #22 | |
| 5518091 | ESCALPELO ESTERILIZ. CUTFIX #24 |  |
| BA224 | ESCALPELO AÇO CARBONO #24 | |
| 5518105 | ESCALPELO ESTERILIZ. CUTFIX #12 |  |
| BA212 | ESCALPELO AÇO CARBONO #12 | |
| BA215-C | ESCALPELO AÇO CARBONO #15-C |  |
| BB515-C | LAMINAS DE ESCALPELO AÇO CARBONO #15-C |  |

Indicações

O bisturi é um instrumento usado em cortes e incisões nos tecidos mole, tais como: peles, músculos, membranas, cartilagens e órgãos em geral. O seu uso é único, não podendo ser reaproveitado nem

Instruções de Uso

BISTURI DESCARTAVEL AESCULAP

reesterilizado, devendo ser descartado em lixo cirúrgico para evitar qualquer tipo de contato com os mesmos.

Os Bisturis Descartáveis Aesculap, destinam-se a profissionais da área de saúde, em especial Médicos, Dentistas e Veterinários com a finalidade de atender aos mais variados tipos de procedimento cirúrgico que necessite de incisão (corte).

Princípio de Funcionamento

As lâminas do Bisturi Descartável Aesculap são laminadas a fio com tratamento térmico, o que assegura a sua resistência e alto poder de corte. Seu processo de fabricação automático é acompanhado em todas as fases e o fio da lâmina não é manuseado em nenhuma etapa.

As formas da lâmina na área de corte irão variar da seguinte forma: curva em semicírculo, reta ou curva. Atendendo assim os mais variados tipos de cortes nos procedimentos cirúrgicos.

Modo de Uso do produto

O uso do bisturi deverá ser feito por cirurgião utilizando a técnica necessária ao procedimento, os passos a serem seguidos são:

- Retirar a tampa protetora com cuidado. Todo esse processo deverá ser feito com técnicas estéreis.
- O bisturi é empunhado por cima, com o cabo apoiado na palma da mão, nas incisões magistrais, ou somente pelos dedos, como se fora um arco de violino, na seção de tecidos frouxos que não requeiram praticamente força alguma. Em incisões muito pequenas e de grande precisão pode ser usado como se fora um lápis.
- Após a utilização da lâmina, fazer o descarte do bisturi em lixos cirúrgicos adequados de acordo com as normas da vigilância local.

Instruções de Uso

BISTURI DESCARTAVEL AESCULAP

Composição

As lâminas do Bisturi Descartável Aesculap são fabricadas em aço carbono seguindo os padrões de composição do aço das normas ISO 7740 e 7153. Sua rigidez nunca é inferior a 800 HV. A lâmina do bisturi é coberta por uma tampa protetora transparente.

Condições de Armazenamento

- Armazenar todos os componentes em sua embalagem original.
- Armazenar em local seco, limpos, livres de raios solares e vapores químicos.
- Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas

Condições para o Transporte

- Para manter a esterilidade do produto quando os bisturis forem transportados, estes não devem ser danificados ou expostos à poluição.
- Durante o transporte os bisturis devem estar abrigados em local livre de umidade e solavancos.

Condições de Manipulação

- Este produto deve ser manuseado por profissional da área de saúde devidamente treinado para utilização do mesmo;
- A manipulação do produto deve ser feita preferencialmente com proteção das mãos;
- Se a embalagem estiver violada ou danificada, não utilizar este produto;
- Retirar a tampa protetora com cuidado até o aparecimento da lâmina do bisturi.
- Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.

Advertências / Precauções

Instruções de Uso

BISTURI DESCARTAVEL AESCULAP

- SEMPRE verifique a integridade da embalagem, caso ela apresente sinais de abertura NÃO utilizar;
- SEMPRE utilizar técnicas assépticas antes e durante o procedimento;
- SEMPRE utilizar técnicas instrumentais adequadas no manuseio do bisturi;
- SEMPRE tenha atenção ao retirar a tampa protetora do bisturi a fim de evitar a possibilidade de cortes acidentais;
- SEMPRE descartar o bisturi em locais apropriados, conforme a legislação vigente da vigilância sanitária local;
- SEMPRE armazenar em locais limpos, secos, livres dos raios solares e vapores químicos;
- SEGUIR as instruções de transporte e armazenagem não pisando nem apoiando objetos nas caixas secundárias e obedecendo ao empilhamento máximo para as caixas terciárias;
- Por se tratar de produto com validade, SEMPRE utilize o princípio do PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) para evitar o vencimento do produto na área de armazenagem;
- NUNCA reutilizar o bisturi. Produto de uso único;
- NUNCA utilizar o bisturi, caso haja alguma contaminação antes ou durante o procedimento;
- NUNCA utilizar a lâmina sem o cabo de bisturi a fim de evitar riscos desnecessários;
- ATENÇÃO: Em caso de presença de deformações na superfície da lâmina ou indícios de perda de esterilidade o uso deste lote deve ser suspenso e o fornecedor deve ser contatado.

Esterilização

- Os Bisturis Descartáveis Aesculap são esterilizados com radiação gama, dando ao produto uma validade de 5 anos após a data de esterilização.
- Produto de Reprocessamento Proibido (Conforme RE 2605/2006)

Formas de apresentação comercial

Os Bisturis são fornecidos embalados individualmente e posteriormente colocados em caixas de papelão, contendo 10 peças. Os materiais de embalagem são adequados para radiação gama e podem garantir uma durabilidade da embalagem de pelo menos cinco anos.

Instruções de Uso**BISTURI DESCARTAVEL AESCULAP**

Fabricado por:

AESFULAP AG
Am Aesculap Platz
D-78532-Tuttlingen - Alemanha

Importado e Distribuído por:

Laboratórios B. Braun S/A
Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09 -
Arsenal
São Gonçalo – RJ - Cep 24751-000
CNPJ: 31.673.254/0001-02
Resp. Téc.: Sônia M. Q. de Azevedo CRF-RJ 4260
Registro ANVISA nº: 80136990506
SAC: 0800 0227286