

COMBI RED

Tapa de uso versátil com conector Luer-Lock Interno e Externo.

Estéil e Apirogênica.

Produto de uso único - Destruir após o uso - Proibido Reprocessar. Esterilizado por Óxido de Etileno ou Raios Gama.

Utilizar somente se a embalagem original estiver íntegra.

Pode ser adaptado a bombas de infusão.

Deve ser estocado em local limpo, protegido da luz e da umidade e a uma temperatura entre 15 - 25°C.

Prazo de Validade: 5 anos, desde que a embalagem original esteja íntegra.

Instruções para o uso:

1. Lave as mãos;
2. Abra a embalagem, utilizando técnica asséptica;
3. O COMBI RED oferece dupla conexão luer-lock, destinando-se à oclusão de qualquer tipo de acesso do sistema de infusão ou podendo ainda ser utilizado para proteção de seringas com soluções.

Tapa de uso versátil com conector Luer-Lock Interno y Externo.

Estéil y Apirogénica.

Producto de uso único - Destruir después del uso - Prohibido Reprocesar.

Esterilizado por Óxido de Etileno o Rayos Gama.

Utilizar sólo si el embalaje original está íntegro.

Puede ser adaptado a bombas de infusión.

Debe almacenarse en un lugar limpio, protegido de la luz y de la humedad a una temperatura entre 15 - 25°C.

Plazo de validez: 5 años, siempre que el embalaje original esté íntegro.

Instrucciones para el uso:

1. Lávese las manos;
2. Abra el embalaje, utilizando técnica aséptica;
3. El COMBI RED ofrece doble conexión luer-lock, destinado a la oclusión de cualquier tipo de acceso del sistema de infusión o pudiendo aún ser utilizado para protección de jeringas con soluciones.

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal

CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil

Registro ANVISA nº.: 1.00085.30103

CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira

S.A.C.: 0800-0227286

3.107.024 Rev. C 02.24

B | BRAUN