

# Equipo para Administración de Dietas Enteras por gravedad Cross Spike IL

## Equipo Enteral ENFit Gravitacional

### Enterafix Cross Spike ENFit

#### Enterafix Cross Spike IL

Producto de uso único - Destruir após o uso.

Proibido reprocessar.

Enterafix Cross Spike - Validade de 5 anos desde que a embalagem original esteja íntegra.

Enterafix Cross Spike ENFit - Validade de 5 anos desde que a embalagem original esteja íntegra.

Estéril - Apirrogénico - Esterilizado por Óxido de Etileno.

#### Advertências:

Antes de remover o protetor do conector escalonado, certifique-se de que o mesmo está devidamente rosqueado ao tubo do equipo, a fim de evitar vazamentos.

#### Indicação: Destina-se a administração de dietas enterais.

#### Instruções de uso:

1. Fechar a pinça rolete do equipo;
2. Conectar o equipo ao recipiente com a dieta enteral;
3. Pendurar o recipiente com a dieta enteral;
4. Abrir a pinça rolete do equipo;
5. Retirar todo o ar do equipo;
6. Conectar à Sonda Enteral do paciente.
- 7A. O equipo Enterafix Cross Spike IL possui um injetor lateral válvula needle-free para conexão com seringa, que permite a administração de água e medicamentos

na forma líquida no trato gastrointestinal.

- 7B. O equipo Enterafix Cross Spike ENFit possui uma segunda via para administração de líquidos (água e medicamentos) com conector ENFit para conexão em equipos enterais e/ou perfusores e/ou seringas do modelo ENFit.
8. Para o Equipo Enterafix Cross Spike IL recomendamos para infusão de grandes volumes que precisarão de maior tempo e maior pressão, o pinçamento manual do equipo na porção superior à válvula para garantir o direcionamento do fluxo.

#### Precauções, restrições, advertências, armazenagem e transporte:

- Produto Isento de DEHP (DOP).
- Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.
- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo.
- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.
- Deve ser utilizado uma só vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou reesterilização.

- Manter o produto em ambiente limpo e arejado.
- Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade.

#### Equipo para suministración de dietas enterales por gravedad.

Producto de un sólo uso - Desechar después de usar.

Proibido reprocessar.

Enterafix Cross Spike - Plazo de validez: 5 años desde que el envase original esté íntacto.

Enterafix Cross Spike ENFit - Plazo de validez: 5 años desde que el envase original esté íntacto.

Estéril - Apirógeno - Esterilizado por Óxido de Etileno.

#### Indicación: Para suministro de dietas enterales.

#### Instrucciones de uso:

1. Cerrar la pinza del equipo;
2. Conectar el equipo al recipiente con la dieta enteral;
3. Colgar el recipiente con la dieta;
4. Abrir la pinza del equipo;
5. Sacar todo el aire del equipo;
6. Conectar a la sonda del paciente y proceder a la administración.
- 7A. El equipo Enterafix Cross Spike IL tiene un inyector lateral válvula needle-free para conexión con jeringa, que permite la administración de agua y medicamentos en forma líquida en el tracto gastrointestinal.
- 7B. El equipo Enterafix Cross Spike ENFit cuenta con una segunda

via de administración de líquidos (agua y medicamentos) con conector ENFit para conexión a equipos enterales y/o perfusores y/o jeringas del modelo ENFit.

8. Para El equipo Enterafix Cross Spike recomendamos para la infusión de grandes volúmenes que requerirán más tiempo y mayor presión, la sujeción manual del equipo en la parte superior de la válvula para asegurar la dirección del flujo.

#### Precauciones, restricciones, advertencias, almacenaje y transporte:

- PRODUCTO LIBRE DE DEHP (DOP)
- Los experimentos con animales han demostrado que el DEHP (DOP) ES potencialmente tóxico para la reproducción. Teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento, no se excluye por completo un riesgo (en el caso de uso a largo plazo) sobre todo para los bebés varones.
- No utilizar el producto se el paquete o el contenido esté dañado.
- Todos los procedimientos relacionados al manejo del producto deben quedarse con todos cuidados, de manera a no tener cualquier contaminación.
- Debe ser utilizado una única vez, no permitiendo el reaprovechamiento o re-esterilización.
- Mantener el producto en local limpio y seco.
- Transportar el producto con cuidados necesarios de manera a mantener la integridad.

#### Significado da Simbologia Utilizada:



Uso único



Isento de latex



Consultar as instruções para utilização



Número de referência



Código do lote



Esterilizado utilizando óxido de etileno



Data de fabricação/data de esterilização



Validade



Sem DEHP

Fabricado por:

#### Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal  
 CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil  
 Enterafix Cross Spike ENFit - Registro ANVISA n.º: 80136990955  
 Enterafix Cross Spike IL - Registro ANVISA n.º: 80136990930  
 CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira  
 S.A.C.: 0800-0227286

3.107.050 Rev. D.02.24

# B | BRAUN