

Equipo Livre de PVC para Infusão Parenteral em Bombas de Infusão B. Braun

Infusomat Space Set Air IL PVC Free / Infusomat Space Set Air PVC Free Sterifix

Produto de uso único – Proibido Reprocessar – Destruir após o uso. Estéril – Atóxico – Apirogênico Esterilizado por Óxido de Etileno.

Indicação:

Equipos para administração de soluções parenterais, por meio de bombas de infusão B. Braun.


Precauções e Advertências:

- Os produtos que compõem a família não são indicados para administração de soluções parenterais fotossensíveis e medicações fotossensíveis;

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Artigo de uso único, não sendo permitido o reaproveitamento ou reesterilização;
- Descartar imediatamente após o uso.

Cuidados de armazenamento e transporte:

- Conservar em ambiente limpo e seco, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra;
- Transportar com os cuidados necessários para manter a integridade do produto.

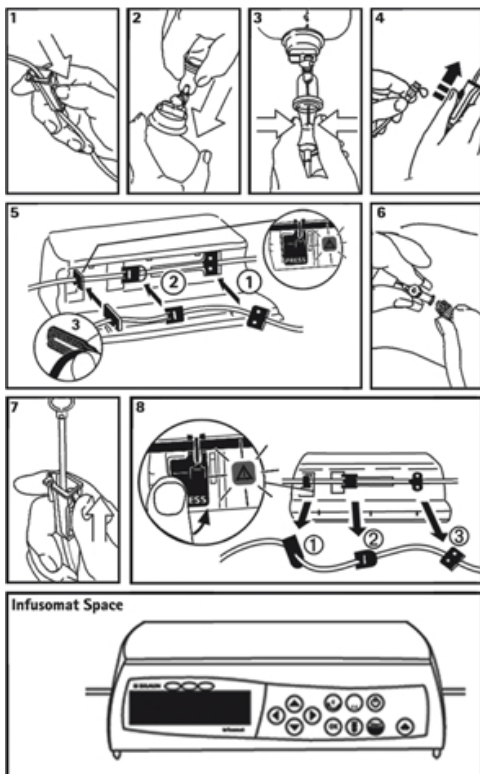

Instruções para Uso:

- Fechar a pinça rolete;
- Conectar o equipo ao recipiente com a solução;
- Preencher a câmara de gotejamento;
- Executar o preenchimento total da linha retirando todo o ar;
- Instalar o equipo na Infusomat® Space;
- Conectar a extremidade da linha ao paciente;
- Abrir a pinça rolete para liberar o fluxo corretamente;
- Atenção para os detalhes da fixação do equipo na Infusomat® Space.

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº.: 8.01369.90468
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.002 Rev. C 02.24