

Equipos fotossensíveis, isentos de PVC, para administração de soluções parenterais em bombas de infusão

Intrafix Compact AIR PVC Free FS

Infusomat Space Set AIR PVC Free FS

Produto de uso único.

Proibido reprocessar.

Estéril – Apirigénico – Atóxico.

Esterilizado por óxido de etileno.

Indicação de Uso

Administração de soluções ou medicamentos fotossensíveis. Manutenção do volume de soluções, substituição do volume de soluções, infusão de nutrição parental total, infusão de antibióticos em frascos ou bolsas, administração de alguns agentes quimioterápicos (citostáticos) que interajam com PVC.

Instruções de Uso

INTRAFIX COMPACT AIR PVC FREE FS

1. Fechar a pinça rolete e a entrada de ar da ponta perfurante;
2. Conectar o equipo ao recipiente com a solução. Movimento único, e ângulo reto (90°);

3. Pendurar o recipiente e se este for rígido, abrir a entrada de ar da ponta perfurante;
4. Ajustar o nível da solução no interior da câmara de gotejamento;
5. Abrir a pinça rolete e preencher o equipo retirando todo o ar;
6. Instalar o equipo na bomba de infusão e conectar sua extremidade ao paciente.
7. Fechar a pinça rolete;
8. Instalar o equipo na Infusomat® Space;
9. Programar o equipamento de acordo com a prescrição médica;
10. Conectar a extremidade da linha ao paciente;
11. Abrir a pinça rolete para liberar o fluxo corretamente;
12. Seguir as orientações do equipamento sobre o início da infusão;
13. Atenção para os detalhes da fixação do equipo na Infusomat® Space.

INFUSOMAT SPACE SET AIR PVC FREE FS

1. Fechar a pinça rolete;
2. Conectar o equipo ao recipiente com a solução. Movimento único, e ângulo reto (90°);
3. Preencher a metade da porção inferior da câmara de gotejamento;
4. Abrir a entrada de ar, somente, em casos de utilização de soluções em frascos rígidos;
5. Abrir a pinça rolete;
6. Executar o preenchimento total da linha retirando todo o ar;

Advertências

- A reutilização de dispositivos de uso único cria um risco potencial para o paciente ou usuário. Isso pode levar a contaminação e/ou comprometimento da capacidade funcional. A contaminação e/ou a funcionalidade limitada do dispositivo podem levar a lesões, doenças ou morte do paciente;
- Estéril, livre de pirogênio;

- Não utilizar em caso de violação da embalagem primária e/ou se as tampas de proteção estiverem perdidas ou soltas;
- Cuidado! Se um for utilizada bolsa pressórica durante a infusão, remova previamente o ar do tubo;
- Observe as precauções gerais de segurança!
- Em frascos flexíveis e Ecoflac, deixe a entrada de ar fechada.

Precauções

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo;
- Não é permitido sua reesterilização sob nenhuma hipótese;
- Conservar em local seco e arejado de forma a manter sua integridade;
- Antes de utilizar o produto, verificar o prazo de validade. Não utilizar se o prazo de validade estiver vencido.

Significado da Simbologia Utilizada:



Produto de uso único



Vide Instruções de Uso



Isento de Látex



Referência



Lote nº



Esterilizado por Óxido de Etileno



Data de Fabricação/ Data de Esterilização



Validade



Sem DEHP

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal

CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil

Registro ANVISA nº.: 80136990942

CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira

S.A.C.: 0800-0227286

3.107.046 Rev. C 02.24

B | BRAUN