

Equipos Gravitacionais para Nutrição Enteral

Enteralfix Set Ent Air Esc, Enteralfix Set Ent Cross Spike Air, Enteralfix Set Ent Cross Spike Enfit

Produto de uso único – Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

Validade de 5 anos desde que a embalagem original esteja íntegra.

Estérel – Apirrogénico – Esterilizado por Óxido de Etileno.

Indicação de uso:

Equipos para administração de dietas enterais.

Instruções de uso:

1. Fechar a pinça rolete do equipo;
2. Conectar o equipo ao recipiente com a dieta enteral;
3. Pendurar o recipiente com a dieta enteral;
4. Abrir a pinça rolete do equipo;
5. Retirar todo o ar do equipo;
6. Conectar à Sonda Enteral do paciente.
7. Abrir e regular a pinça rolete do equipo conforme prescrição médica.

Precauções:

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.

Não é permitida sua reesterilização sob nenhuma hipótese.

Conservar em local seco e arejado de forma a manter sua integridade.

Descartar imediatamente após o uso.

Antes de utilizar o produto, verificar o prazo de validade. Não utilizar se o prazo de validade estiver vencido.

Os equipos são fornecidos estéreis e, portanto, se as embalagens estiverem danificadas, rasgadas ou perfuradas, devem ser considerados não estéreis e os produtos descartados.

Recomenda-se a troca dos equipos a cada 24 horas.

Advertência:

Produto Isento de DEHP (DOP). Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.

Antes de remover o protetor do conector escalonado, certifique-se de que o mesmo está devidamente rosqueado ao Conector ENFit, a fim de evitar vazamentos.

Equipo para administração de dietas enterais por gravidade.

Produto de um só uso – Desechar depois de usar.

Proibido reprocessar.

Plazo de validez: 5 años desde que el envase original esté íntacto.

Estérel – Apirógéno – Esterilizado por Óxido de Etileno.

Indicación:

Para suministro de dietas enterales.

Instrucciones de uso:

1. Cerrar la pinza del equipo;
2. Conectar el equipo al recipiente con la dieta enteral;
3. Colgar el recipiente con la dieta;
4. Abrir la pinza del equipo;
5. Sacar todo el aire del equipo;
6. Conectar a la sonda del paciente y proceder a la administración;
7. Abra e reluga la tranca corrente según prescripción médica.

Precauciones:

No utilizar el producto si el empaque está dañado.

Desechar después de usar.

Antes de utilizar este producto, verifique la fecha de vencimiento. No lo use si ha expirado. Es recomendado el cambio de los productos a cada 24 horas.

Condiciones de Almacenamiento: Mantener el producto en un lugar limpio y seco, con los cuidados necesarios para mantener el empaque íntacto. Los productos son estériles

y si las embalajes estén dañados, deben ser ser desechados.

Advertencia:

PRODUCTO LIBRE DE DEHP (DOP)

Los experimentos con animales han demostrado que el DEHP (DOP) ES potencialmente tóxico para la reproducción. Teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento, no se excluye por completo un riesgo (en el caso de uso a largo plazo) sobre todo para los bebés varones.

Antes de retirar el protector del conector escalonado, asegúrese de que este conector esté enroscado correctamente en el Conector ENFit con el fin de evitar fugas.



Cuidado

Instrução de Uso em formato não impresso conforme Instrução Normativa – IN n.º 4 de 15 de junho de 2012.

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente.

Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

O formato impresso desta Instrução de Uso pode ser obtido, sem custo adicional, através de solicitação ao SAC dos Laboratórios B. Braun S.A.

Significado da Simbologia Utilizada:



Produto de uso único



Consultar Instruções para utilizações



Isento de Látex



Referência



Lote nº



Esterilizado por Óxido de Etileno



Data de Fabricação/ Data de Esterilização



Validade



Sem DEHP

B | BRAUN

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal

CEP: 24751-000 – S. Gonçalo – RJ – Brasil

Registro ANVISA nº.: 80136990979

CNPJ: 31.673.254/0001-02 – Indústria Brasileira

S.A.C.: 0800-0227286

3.107.057 Rev. A 09.24