

Equipos Needle-Free para Uso em Bombas de Infusão

Infusomat Space Set Air Safeflow

Infusomat Space Set Air Neo Safeflow

Produto de uso único – Proibido Reprocessar
Estérel – Esterilizado por Óxido de Etileno

Instruções de uso:

1. Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica.
2. Fechar a pinça rolete e entrada de ar.
3. Retirar o protetor da ponta perfurante (Spike).
4. Introduzir a ponta perfurante (Spike) no frasco ou bolsa em movimento único, evitando a rotação do mesmo.
5. Pendurar o frasco ou bolsa ao suporte de soro.
6. Abrir a pinça rolete, permitindo a passagem da solução pelo tubo, para retirada total do ar.
7. Fechar a pinça rolete.
8. Encaixar o equipo na bomba de infusão, obedecendo a correta posição frasco → paciente.
9. Abrir a pinça rolete
10. Programar a bomba de infusão, de acordo com a prescrição médica para a terapia proposta.
11. Remover o protetor do conector com o paciente.
12. Conectar o equipo ao acesso venoso ou acessório de infusão do paciente.
13. Iniciar a infusão através da tecla start.

Em casos de necessidade de acessar o injetor Needle Free (NF) – administração de medicações intermitentes (Bólus), realizar a desinfecção de acordo com o protocolo adotado pela instituição hospitalar.

Não utilizar, sob hipótese nenhuma, agulhas, sejam elas de quaisquer calibres para acesso ao injetor Needle Free (válvula NF).

Não submeter os equipos a bombas, de altas pressões injetoras de contraste.

Os produtos que compõem a família não são indicados para administração de soluções parenterais fotossensíveis e medicações fotossensíveis.

Precauções:

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.

Não é permitida sua reesterilização sob nenhuma hipótese.

Conservar em local seco e arejado de forma a manter sua integridade.

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Cadastro ANVISA nº.: 80136990885
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.043 Rev. B 02.24