

# Equipos para infusão gravitacional e compatíveis com bomba.

## Dispositivo de infusão i.v. para infusão por gravedad y bombas compatibles.

### Intrafix SS AIR; Intrafix SS AIR IL; Intrafix PL AIR; Intrafix PL AIR IL

Produto de uso único.  
Proibido Reprocessar.  
Estéril – Apirogénico – Atóxico.  
Esterilizado por Óxido de Etileno.

#### Precauções:

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.
- Não é permitida sua reesterilização sob nenhuma hipótese.
- Conservar em local seco e arejado de forma a manter sua integridade.
- Os produtos que compõem a família não são indicados para administração de soluções parenterais fotossensíveis e medicações fotossensíveis.

#### Indicação de uso:

Indicados para administração de soluções parenterais e medicações, acondicionadas em frascos de vidro ou ampolas plásticas.

#### Instruções de uso:

1. Abrir a embalagem através das extremidades indicadas pela tarja verde e retirar o produto.
2. Retirar a tampa protetora e introduzir a ponta perfurante no recipiente que contém a solução a infundir e suspendê-lo.
3. Em caso de frasco rígido, abrir a entrada de ar (dotada de filtro antibacteriano) da câmara gotejadora.
4. Pressionar a parte inferior da câmara gotejadora até que o nível de solução atinja o anel intermediário.
5. Abrir a pinça rolete e efetuar o preenchimento da linha com a solução (Priming).
6. Após o preenchimento completo da linha, fechar a pinça rolete.
7. Conectar a extremidade distal na via de administração.
8. Caso a administração seja realizada através de uma bomba de infusão, instalar o equipo de acordo com as instruções do fabricante.
9. Caso a administração seja realizada por gravidade, ajustar o fluxo desejado (conforme a prescrição médica) através da pinça rolete.

Produto de um só uso.  
Proibido reprocessar.  
Estéril – Apirogénico – Atóxico.  
Esterilizado por Óxido de Etileno.

#### Precaución:

- No utilizar el producto si el paquete o el contenido está dañado.
- No es permitido la re-esterilización.
- Mantener en lugar seco y aireado para mantener la integridad del producto.
- Los productos que componen la familia no son adecuadas para la administración de soluciones parenterales fotossensibles y medicamentos fotossensibles.

#### Indicación del uso:

Indicado para la administración de soluciones parenterales y medicamentos, acondicionados en ampollas de plástico o frascos de vidrio.

#### Instrucciones de uso:

1. Abrir el paquete a través de los extremos indicados por la banda verde y retire el producto.

2. Retire la tapa protectora e inserte la punta de perforación del recipiente que contiene la solución a infundir y suspenderlo.
3. En caso de frasco rígido, abra la entrada de aire (equipada con filtro antibacte-riano) de la cámara de goteo.
4. Pulse la parte inferior de la cámara de goteo hasta que el nivel de la solución alcance el anillo intermedio.
5. Abrir el regulador de goteo y hacer el llenado de la línea con la solución (priming).
6. Después del llenado completo de la línea, cierre el rodillo.
7. Conectar el extremo distal de la vía de administración.
8. Si la administración se realiza utilizando una bomba de infusión, instalar la línea de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
9. Si la administración se lleva a cabo por gravedad, establecer el flujo deseado (Conforme la prescripción médica) a través del regulador de goteo.



Referência/  
Referencia



Lote Nº/  
Lote N°



Validade de  
fabricação/  
Fecha de  
caducidad



Data de  
fabricação/  
Fecha de  
fabricación



Produto de  
uso único/  
Producto de  
un solo uso



Esterilizado por  
Óxido de Etileno/  
Esterilizado por  
Óxido de Etileno



Isento de  
Latex/Libre  
de Latex



Ver instruções  
de uso/Ver  
instrucciones  
de uso



Sem DEHP/  
No contiene  
DEHP



20 gotas  
1 mL/  
20 gotas  
1 mL

# B | BRAUN

Fabricado por:

**Laboratórios B. Braun S.A.**

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal

CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil

CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira

S.A.C.: 0800-0227286

3.107.034 Rev. C 02.24