

Equipos para Infusão Parenteral em Bombas de Infusão B. Braun

Infusomat Space Set CG 150 / Infusomat Space Set CG 150 NEO / Infusomat Space Set Air IL / Infusomat Space Set Air IL NEO

Produto de uso único – Proibido Reprocessar – Destruir após o uso. Estéril – Atóxico – Apirrogênico Esterilizado por Óxido de Etileno.

Indicação:

Equipos para administração de soluções parenterais, por meio de bombas de infusão B. Braun.

Precauções e Advertências:


- Os produtos que compõem a família não são indicados para administração de soluções parenterais fotossensíveis e medicações fotossensíveis;
- Produto Isento de DEHP (DOP);
- Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de

excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino;

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Artigo de uso único, não sendo permitido o reaproveitamento ou reesterilização;
- Descartar imediatamente após o uso.

Cuidados de armazenamento e transporte:

- Conservar em ambiente limpo e seco, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra;
- Transportar com os cuidados necessários para manter a integridade do produto.

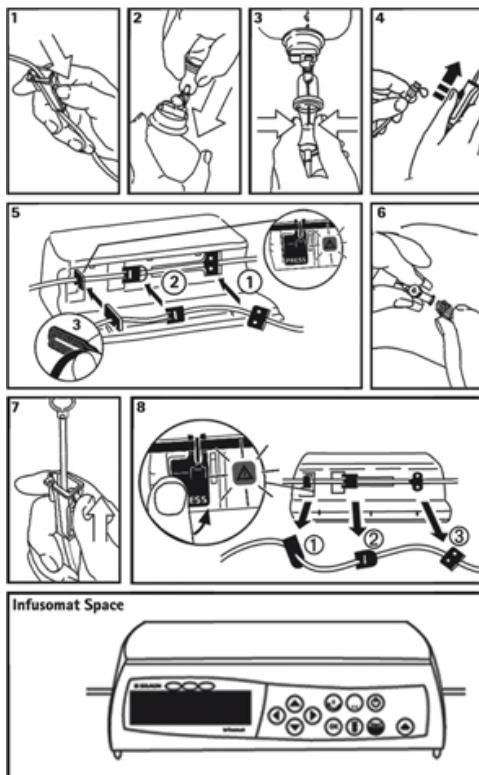

Instruções para Uso:

1. Fechar a pinça rolete;
2. Conectar o equipo ao recipiente com a solução;
3. Preencher a câmara de gotejamento;
4. Executar o preenchimento total da linha retirando todo o ar;
5. Instalar o equipo na Infusomat® Space;
6. Conectar a extremidade da linha ao paciente;
7. Abrir a pinça rolete para liberar o fluxo corretamente;
8. Atenção para os detalhes da fixação do equipo na Infusomat® Space.

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº.: 8.01369.90432
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.003 Rev. D 02.24

B | BRAUN