

Equipos para Nutrição Enteral em Bombas de Infusão

Enterafix Set Ent Air Tk
Enterafix Set Ent Cross Spike / Enterafix Set Ent Compact ENFit
Infusomat Plus Set Ent Air Esc / Infusomat Plus Set Ent Cross Spike
Infusomat Plus Set Ent ENFit / Infusomat Space Set Ent Air Tk
Infusomat Space Set Ent Cross Spike / Infusomat Space Set Ent ENFit

Produto de uso único / Produto de un solo uso – Proibido Reprocessar / Proibido reprocessar

Estérel / Esteril – Apirogénico / Apirogéno

Esterilizado por Óxido de Etileno / Esterilizado por Óxido de Etileno

Indicação de uso / Intención de uso:

Equipos para administração de dietas enterais em bombas de infusão B. Braun Infusomat Compact Plus, Infusomat Space, Infusomat Space Plus, Infusomat Compact e Enteromat Compact / Equipos para la administración de la infusión de la alimentación enteral bombas B. Braun Infusomat Compact Plus, Infusomat Space, Infusomat Space Plus, Infusomat Compact y Enteromat Compact.

Instruções de uso / Instrucciones de uso:

1. Fechar a pinça rolete e a entrada

de ar da ponta perfurante (quando existir) / Cierre la tranca corriente del equipo y la entrada de aire de la punta perforante (cuando existe);
 2. Conectar o equipo ao recipiente com nutrição enteral e pendurar o recipiente / Conecte el Equipo en el recipiente con la nutrición enteral y colgar el recipiente;
 3. Ajustar o nível da dieta no interior da câmara de gotejamento / Ajuste el nivel de nutrición enteral dentro del compartimiento del goteo;
 4. Abrir a pinça rolete e preencher o equipo retirando todo o ar, após preenchimento fechar a pinça rolete / Abra la tranca corriente y llene el sistema que quita todo el air, después de completado, cierra la tranca corriente;

5. Instalar o equipo na bomba de infusão / Instale el Sistema en la bomba;

6. Conectar o Conector ENFit ou a ponta escalonada do equipo à sonda enteral do paciente / Conectar el Conector ENFit o la punta escalonada del equipo a la sonda enteral del paciente;

7. Abrir a pinça rolete para liberar o fluxo corretamente / Abra la tranca corriente para liberar el flujo correctamente;

8. Atenção para os detalhes da fixação do equipo nas bombas de Infusão / Atención a los detalles de la fijación de el equipo en la bomba.

Precauções:

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.

Não é permitida sua reesterilização sob nenhuma hipótese. Conservar em local seco e arejado de forma a manter sua integridade. Descartar imediatamente após o uso. Antes de utilizar o produto, verificar o prazo de validade. Não utilizar se o prazo de validade estiver vencido. Os equipos são fornecidos estéreis e, portanto, se as embalagens estiverem danificadas, rasgadas ou perfuradas, devem ser considerados não estéreis e os produtos descartados. Recomenda-se a troca dos equipos a cada 24 horas.

Advertência:

Produto Isento de DEHP (DOP). Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino. Antes de remover o protetor do conector escalonado, certifique-se de que o mesmo está devidamente rosqueado ao Conector ENFit, a fim de evitar vazamentos.

Precauciones:

No utilizar el producto si el empaque está dañado. Desechar

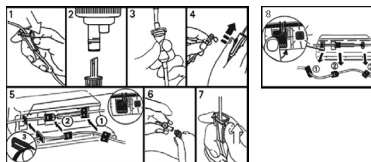


Imagem meramente ilustrativa / Imagen puramente ilustrativa

después de usar. Antes de utilizar este producto, verifique la fecha de vencimiento. No lo use si ha expirado. Es recomendado el cambio de los productos a cada 24 horas.

Condiciones de Almacenamiento:


Mantener el producto en un lugar limpio y seco, con los cuidados necesarios para mantener el empaque intacto. Los productos son estériles y si las embalajes estén dañados, deben ser ser desechados.

Advertencia:

PRODUCTO LIBRE DE DEHP (DOP)

Los experimentos con animales han demostrado que el DEHP (DOP) ES potencialmente tóxico para la reproducción. Teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento, no se excluye por completo un riesgo (en el caso de uso a largo plazo) sobre todo

para los bebés varones. Antes de retirar el protector del conector escalonado, asegúrese de que este conector esté enroscado correctamente en el Conector ENFit con el fin de evitar fugas.



Cuidado

Instrução de Uso em formato não impresso conforme Instrução Normativa - IN n.º 4 de 15 de junho de 2012.

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto. O formato impresso desta Instrução de Uso pode ser obtido, sem custo adicional, através de solicitação ao SAC dos Laboratórios B. Braun S.A.

Significado da Simbologia Utilizada:

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
|  Produto de uso único |  Consultar Instruções para utilizações |  Isento de Látex |  Referência |  Lote nº |  Esterilizado por Óxido de Etileno |  Data de Fabricação/ Data de Esterilização |  Validade |  Sem DEHP |  Gota por mililitro |
|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
 CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
 Registro ANVISA nº.: 80136999091
 CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
 S.A.C.: 0800-0227286

