

Extensofix®

Extensão para Equipos de Infusão Parenteral

Produto de uso único – Destruir após o uso – Proibido reprocessar.
Estéril – Atóxico – Apirogênico.
Esterilizado por Óxido de Etileno.

Finalidade de Uso/Aplicação:

Extensofix® é uma extensão para equipos de infusão parenteral, atóxico, estéril e aprotogénico. Produto de uso único, esterilizado por óxido de etileno.

Instruções de Uso:

- Abrir a embalagem sob condições assépticas.
- Verificar se os conectores apresentam-se com os protetores de esterilização.
- Retirar o protetor de Cone Luer.
- Adaptar o cone Luer no equipo soro/sangue.
- Preencher o tubo com solução estéril.
- Retirar o outro protetor do conector.
- Adaptar o conector luer no acesso venoso.
- Proceder o controle da infusão da solução.

Precauções:

- Produto Isento de DEHP (DOP).
- Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebés do sexo masculino.
- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo.
- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.
- Deve ser utilizado uma só vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou reesterilização.

Cuidados de Armazenagem e Transporte:

Mantém o produto em ambiente limpo e seco e transportar com os cuidados necessários, para que a embalagem permaneça íntegra.

Produto de uso único – Destruir después del uso – Prohibido reprocessar.

Estéril – Atóxico – Apirogénico.
Esterilizado por Óxido de Etileno.

Finalidade de Uso/Aplicación:

Extensofix® es una extensión para equipos de infusión parenteral, atóxico, estéril y aprotogénico. Producto de uso único, esterilizado por óxido de etileno.

Instrucciones de Uso:

- Abrir el embalaje bajo condiciones asépticas.
- Verificar si los conectores se presentan con los protectores de esterilización.
- Retirar el protector de cono Luer.
- Adaptar el cono Luer en el equipo Soro/Sangre.
- Rellenar el tubo con solución estéril.
- Retirar el otro protector del conector.
- Adaptar el conector Luer al acceso venoso.
- Proceder al control de la infusión de la solución.

Precauciones:

- Producto libre de DEHP (DOP).
- En experimentos animales se

ha comprobado que el DEHP es potencialmente tóxico para la reproducción. En el estado actual de los conocimientos científicos, no puede descartarse completamente el riesgo que existe, en caso de utilización a largo plazo, sobre todo en bebés varones. Como precaución, el uso de productos médicos que contengan DEHP debe restringirse a un corto espacio de tiempo en mujeres durante el embarazo y la lactancia, lactantes y niño.

- No usar el producto si se constata la violación de la integridad del envoltorio o de su contenido.
- Todos los procedimientos relacionados a la manipulación del producto deben rodearse de los mayores cuidados, para evitar cualquier contaminación.
- Debe utilizarse una única vez, no se permitiendo en cualquier hipótesis su reaprovechamiento o re-esterilización.

Cuidados de Almacenamiento y Transporte:

Mantener el producto en ambiente limpio y seco, y transportarlo con los cuidados necesarios, para que el embalaje permanezca íntegro.



Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº.: 1.00085.30027
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.011 Rev. B 02.24