

Equipos de Sangue e hemoderivados para Bomba de Infusão

Eurofix Compact Sangue / Eurofix Compact CG 150 Sangue / Intrafix Compact Sangue

Produto de uso único – Destruir após o uso. Proibido reprocessar. Estétil – Apirogênico – Atóxico. Esterilizado por Óxido de Etileno.

Precauções:

- Produto isento de DEHP (DOP). Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.
- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo;
- Não é permitido sua reesterilização sob nenhuma hipótese;
- Conservar em local seco e arejado de forma a manter sua integridade.

Cuidados de conservação:

Mantener o produto em ambiente limpo e seco, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Instruções para Uso:

1. Fechar a pinça rolete e a entrada de ar da ponta perfurante;
- 1.1. Nos equipamentos com câmara graduada, fechar também a pinça corta fluxo;
2. Conectar o equipo ao recipiente com a solução;

3. Pendurar o recipiente e se este for rígido, abrir a entrada de ar da ponta perfurante;
- 3.1. Nos equipamentos com câmara graduada, abrir a entrada de ar e a pinça corta fluxo para preencher a câmara;
4. Ajustar o nível da solução no interior da câmara de gotejamento;
5. Abrir a pinça rolete e preencher o equipo retirando todo o ar;
6. Instalar o equipo na bomba de infusão e conectar sua extremidade ao paciente.

Producto de un solo uso – Desearchar después de usar.
Estétil – Apirogénico – Atóxico.
Esterilizado por Óxido de Etileno.

Precauções:


- Cuidados de conservación: Mantener el producto en ambiente limpio y seco con los cuidados necesarios para integridad del paquete. PRODUCTO LIBRE DE DEHP (DOP)
- Los experimentos con animales han demostrado que el DEHP (DOP) ES potencialmente tóxico para la reproducción. Teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento, no se excluye por completo un riesgo (en el caso de uso a largo plazo) sobre todo para los bebés varones.
- No usar el producto en caso que el paquete esté violado o el contenido dañado;
- No es permitido re-esterilizar de ninguna forma;
- Conservar en sitio seco y aireado de manera que permita mantener la integridad del producto.

Cuidados de conservación:

Mantener o produto em ambiente limpo e seco com os cuidados necessários para integridade del empaque.

Instrucciones de uso:

1. Cierre la tranca corriente del equipo y la entrada de aire de la punta perforante;
- 1.1. También cierre la tranca corta flujo en el equipo con compartimiento graduado;
2. Conectar el equipo al recipiente con la solución;
3. Colgar el recipiente y si es rígido, abra la entrada de aire de la punta perforante;
- 3.1. En equipo con compartimiento graduado abrir la entrada de aire y la tranca corta flujo para llenar el compartimiento;
4. Ajuste el nivel de solución dentro del compartimiento de goteo;
5. Abra la tranca corriente y llene el sistema que quita todo el aire;
6. Instale el sistema en la bomba de infusión y conecte la extensión al paciente.

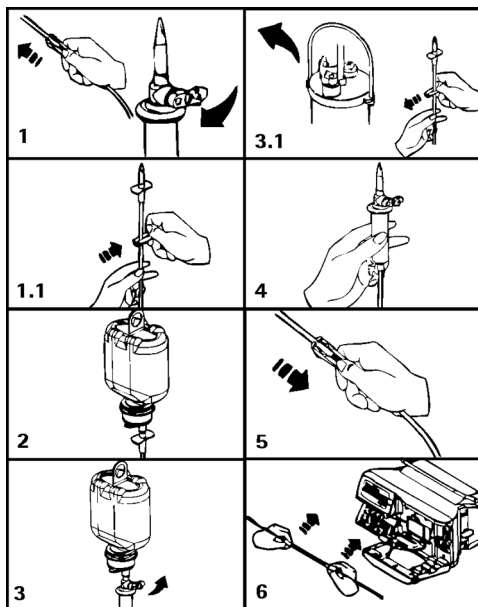

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº.: 8.01369.90440
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

B | BRAUN

3.107.018 Rev. B 02.24