

Equipos para infusão simultânea de soluções parenterais.

POLIFIX 2 IL LONGO / POLIFIX 2 IL LONGO ST / POLIFIX 2 (SPIN LOCK) / POLIFIX 2 (SPIN LOCK) ST / POLIFIX 2 (NEO) / POLIFIX 2 (NEO) ST

Indicação:

Os equipos da família Polifix® são indicados para infusão simultânea de soluções parenterais.

Produto de uso único - Proibido reprocessar.

Estéril - Apirrogêno - Atóxico - Esterilizado por Óxido de etileno.

Precauções:

- Produto Isento de DEHP (DOP).
- Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.
- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.
- Não é permitido sua reesterilização sob nenhuma hipótese.
- Conservar em local seco e arejado de forma a manter sua integridade.

Instruções de uso:

- 1- Retirar o dispositivo do invólucro protetor; retirar a tampa protetora do conector luer fêmea e realizar o priming do produto;
- 2- Fechar as pinças "clamp";
- 3- Retirar a tampa protetora do intermediário luer macho;
- 4- Conectar o Polifix® no cateter venoso;
- 5- Em caso de infusão simultânea,

- conectar as linhas venosas nos conectores luer fêmea;
- 6- Abrir as pinças clamp;
- 7- Regular o fluxo conforme a prescrição médica.

Cuidados de Conservação:

Manter o produto em ambiente limpo e seco, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Producto de un solo uso - Prohibido re-procesar.


Estéril - Apirógono - Atóxico - Esterilizado por Óxido de Etileno.

Precauciones:

- Producto libre de DEHP (DOP).
- En experimentos animales se ha comprobado que el DEHP es potencialmente tóxico para la reproducción. En el estado actual de los conocimientos científicos, no puede descartarse completamente el riesgo que existe, en caso de utilización a largo plazo, sobre todo en bebés varones. Como precaución, el uso de productos médicos que contengan DEHP debe restringirse a un corto espacio de tiempo en mujeres durante el embarazo y la lactancia, lactantes y niño.
- No usar el producto caso sea verificado la violación de la integridad del envoltorio o de su contenido.
- No es permitido su re-esterilización bajo ninguna hipótesis.
- Conservar en local seco y ventilado de forma a mantener su integridad.

Instrucciones de uso:

- 1- Retirar el dispositivo del envoltorio protector; sacar la tampa protectora del conector luer hembra y realizar el "priming" del producto;
- 2- Cerrar las pinzas "clamp";

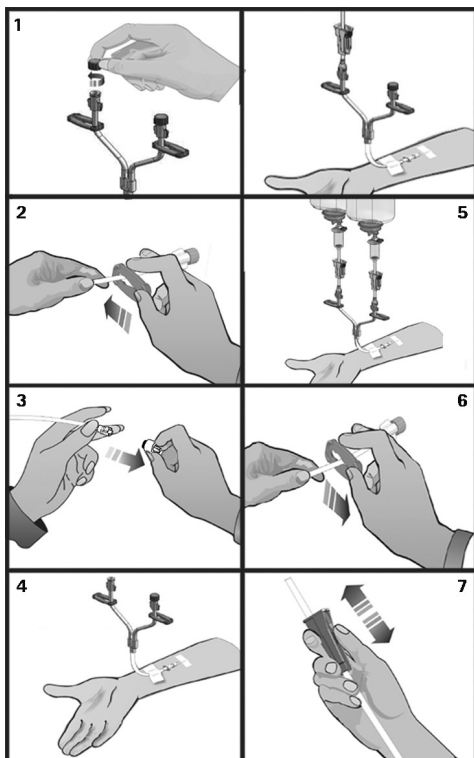

- 3- Retirar la tapa protectora del intermediario luer macho;
- 4- Conectar el Polifix® en el cateter venoso;
- 5- En caso de infusión simultanea, conectar las lineas venosas en los conectores luer hembra;
- 6- Abrir las pinzas "clamp";
- 7- Regular el flujo conforme la prescripción médica.

Cuidados de Conservación:

Manter o produto em ambiente limpo e seco, com cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.



Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº.: 1.00085.30425
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.021 Rev. D 02.24