

Transofix

Sistema de transferência para fluidos estéreis

Estétil - Apirogênico - Esterilizado por irradiação de Raios Gama ou Óxido de Etileno.

Produto de uso único - Destruir após o uso - Proibido Reprocessar.

Indicação:

Sistema de transferência para fluidos estéreis que consiste de duas pontas perfurantes com um meato interno comunicante entre elas, utilizado para reconstituição de drogas liofilizadas e produtos injetáveis que necessitem ser adicionados e misturados em fluidos estéreis.

Estétil - Apirogênico - Esterilizado por irradiação de raios Gama ou Óxido de Etileno.

Produto de un solo uso - Destruir después de usar - Prohibido reprocessar

Indicação:

Sistema de transferencia para fluidos esteriles que consiste en dos puntas perforantes con un medio interno que se comunica entre ellas, utilizado para reconstitución de drogas liofilizadas y productos inyectables que necesiten ser adicionados y mezclados en fluidos esteriles.

Instruções de uso:

Retirar asépticamente o conjunto do invólucro protetor e fazer a conexão aos segmentos necessários ao uso indicado.

Precauções:

- 1- Não usar o produto, caso seja constatada violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo.
- 2- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.
- 3- Deve ser utilizada uma só vez,

não se permitindo em hipótese alguma, seu reaproveitamento ou reesterilização.

- 4- O produto, logo após o uso, deve ser imediatamente descartado, procedendo-se de preferência à sua incineração.

Prazo de validade:

5 anos, desde que a embalagem original esteja íntegra.

Cuidados de conservação e transporte:

Tomar os cuidados necessários para que a embalagem original permaneça íntegra.

Instrucciones de uso:

Retirar asépticamente el conjunto del envoltorio protector y hacer la conexión a los segmentos necesarios al uso indicado.

Precauciones:

- 1- No usar el producto caso sea

verificado la violación de la integridad del envoltorio, o de su contenido;

- 2- Todos los procedimientos relacionados a la manipulación del producto deben ser envueltos de los mayores cuidados, a fin de evitar cualquier contaminación;
- 3- Debe ser utilizado una sola vez; No es permitido en ninguna hipótesis su reciclaje o re-esterilización;
- 4- El producto, luego después del uso, debe ser inmediatamente desechado, procediéndose preferiblemente a su incineración.

Plazo de validez:

5 años, desde que el embalaje original esté íntegro.

Cuidados de conservación y transporte:

Tomar todos los cuidados necesarios para que el embalaje original permanezca íntegro.

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº.: 1.00085.30358
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.026 Rev. B 02.24