

FICHA TÉCNICA – PRONTOSAN® GEL

DESCRIÇÃO

Gel para limpeza e descontaminação de feridas, composto por betaina (surfactante) e polihexanida. Produzido em sistema fechado estéril, livre de endotoxinas e pronto para uso. Registrado no MS como produto para a saúde Classe IV.

INDICAÇÕES

Limpeza, hidratação e descontaminação de todos os tipos de feridas, principalmente as cavitárias, podendo permanecer aberto por até 08 semanas após o rompimento do lacre.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não usar o produto em caso ou suspeita de alergia a qualquer um dos seus componentes.
- Não utilizar em cartilagem hialina; não utilizar em associação com tensoativos aniônicos.
- Não deve usar o produto misturado com outros itens de limpeza de feridas, tais como: sabonetes, pomadas, óleos e enzimas.

BENEFÍCIOS

- Excelente relação custo-benefício: reduz o tempo de cicatrização.
- Reduz os odores da ferida.
- Eficaz para prevenção e tratamento do biofilme.
- Indicado para feridas crônicas e queimaduras.
- Umidifica a superfície da lesão.
- Remove as crostas presentes no leito da ferida.
- Aplicar em camada 3-5 mm de espessura.
- Após aberto pode ser usado por até 8 semanas.


COMPOSIÇÃO

Água purificada, 0,1% de undecilaminopropil betaina, 0,1% de polihexanida, glicerol, hidroxietilcelulose.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO


Manter à temperatura ambiente, de acordo com o prazo de validade.

INSTRUÇÕES DE USO

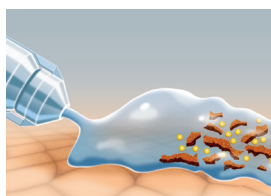


Preparação

Inicialmente procede-se a limpeza com o uso de Prontosan® Solução. Após este procedimento, seguir o tratamento com Prontosan® Gel.

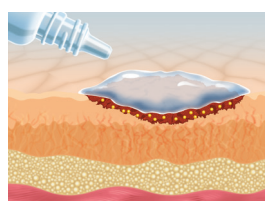

Feridas superficiais

Aplicar Prontosan® Gel diretamente na ferida.
Cobrir a mesma com um curativo secundário de escolha.

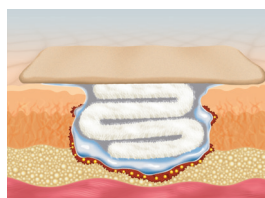

Feridas cavitárias ou fístulas

Preencher todo o orifício com Prontosan® Gel.
Depois cubra com curativo secundário de sua escolha.
Não exercer pressão sobre a ferida na colocação do curativo secundário.

OBSERVAÇÕES

A quantidade de gel a ser aplicado na ferida vai depender do intervalo entre as trocas de curativos:

- Troca diária (até 24 horas): colocar uma camada de pelo menos 3 mm de Prontosan® Gel.
- Troca com intervalo maior que 24 horas: colocar uma camada de 3 a 5 mm de Prontosan® Gel

| Apresentação | Código | Quantidade |
|--------------|--------|-----------------------|
| Frasco 30ml | 400540 | Caixa com 20 unidades |

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286
www.bbraun.com.br