

# FICHA TÉCNICA – PRONTOSAN® SOLUÇÃO

## DESCRIÇÃO

Solução para limpeza e descontaminação de feridas, composto por betaina (surfactante) e polihexanida. Produzido em sistema fechado estéril, livre de endotoxinas e pronta para uso. Registrado na ANVISA como produto para a saúde Classe IV.

## INDICAÇÕES

Limpeza, hidratação e descontaminação de todos tipos de feridas, podendo permanecer aberto por até 08 semanas após o rompimento do lacre. Facilita a remoção de curativos ou coberturas tecnológicas aderidos à lesão.

## CONTRAINDICAÇÕES

- Não usar o produto em caso ou suspeita de alergia a qualquer um dos seus componentes.
- Não utilizar em cartilagem hialina; não utilizar em associação com tensoativos aniônicos.
- Não deve usar o produto misturado com outros itens de limpeza de feridas, tais como: sabonetes, pomadas, óleos e enzimas.

## BENEFÍCIOS

- Excelente relação custo-benefício: reduz o tempo de cicatrização.
- Reduz os odores da ferida.
- Eficaz para a prevenção e tratamento do biofilme.
- Compatível com todos os tipos de curativos (tradicional ou de tecnologia avançada).
- Remove as crostas presentes no leito da ferida.
- Minimiza a dor no momento da troca do curativo.
- Previne infecção.
- Após aberto pode ser usado por até 8 semanas.

## COMPOSIÇÃO

Água purificada, 01% undecilenamidopropil-betaína, 01% poliaminopropil biguanida (polihexadina).

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Aplicação direta no leito da ferida (irrigação).



Inicialmente procede-se a limpeza com o uso de Prontosan® Solução.

2. Umidificar uma compressa com Prontosan® e mantê-la em contato com a ferida por um período de 10 a 15 minutos.



3. Irrigar intensamente os curativos que estejam aderidos na ferida para uma remoção sem traumas.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter à temperatura ambiente, de acordo com o prazo de validade.

Apresentação	Código	Quantidade
Frasco 350ml	400451	Caixa com 10 unidades


Sistema de abertura do frasco Prontosan® Solução:



Prontosan® Solução



Girar a tampa no sentido horário.

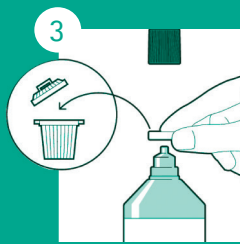

Retirar o anel de proteção.



Recolocar a tampa girando em sentido anti-horário até romper o lacre.

- Após a abertura, o frasco mantém-se viável por até 8 semanas.
- Trabalhar usando técnica asséptica.

B. Braun Brasil | OPM | S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

Prontosan® Solução – Registro ANVISA nº 80136990551

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

