



# SAFEFLOW

## VÁLVULA NEEDLE-FREE

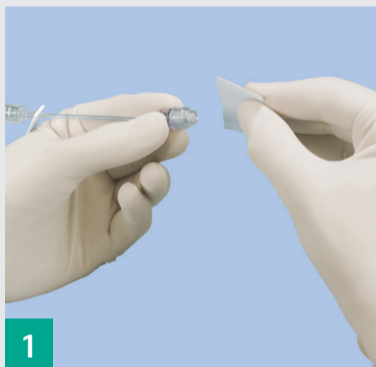


1

Realize desinfecção da válvula conforme protocolo da instituição.

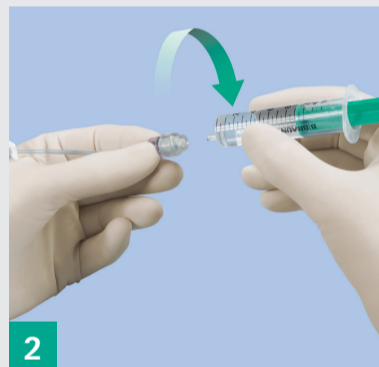


2

Conecte a seringa na válvula Safeflow, gire no sentido horário. Administre a medicação.

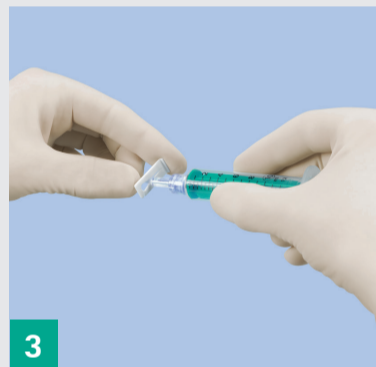

3

Feche a pinça antes de desconectar a seringa para que não haja refluxo sanguíneo.

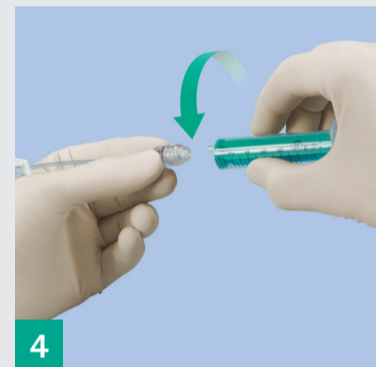

4

Retire a seringa em sentido anti-horário. O Safeflow fechará automaticamente. A troca da válvula Safeflow deverá ser conforme protocolo da instituição.

### BENEFÍCIOS

- Seguro, dispensa o uso de agulhas
- Fácil desinfecção
- Compatível com conexões Luer Lock e Luer Slip
- Látex-free
- Taxa de fluxo: 360 ml/min
- Adaptável a circuitos pediátricos e neonatais



SEGURANÇA